



小型軽量超音波治療器

ソラリスD125B



■仕 様

類別 : 機械器具12理学診療用器具
一般的名称 : 超音波治療器(11248000)
販売名 : ダイナトロン125ソラリス D125B
寸法 : 幅17.8cm、奥行き22.9cm、高さ8.5cm
重量 : 1.8kg
電気定格 : AC100V、50/60Hz、1.2A
タイマー : 1～30分
振動周波数 : 1MHz、2MHz、3MHz
デューティサイクル : 10%、20%、50%、100%
超音波出力 : 0.1～2.0W/cm² (2cm²ヘッド/5cm²ヘッド)
0.1～1.0W/cm² (10cm²ヘッド)
※Watts表示の場合
0.2～ 4Watts(2cm²/ヘッド)
0.5～10Watts(5cm²/ヘッド)
1.0～10Watts(10cm²/ヘッド)
クラス分類 : クラスⅡ 管理医療機器
超音波ヘッド種類 : 2cm²、5cm²、10cm²
出力表示切替 : W/cm²とWatts
医療機器認証番号 : 231AGBZX00010000

■オプション

10cm²サウンドヘッド
コンビネーションリード線

■コンビネーション治療（低周波治療）

アクロトーンレボと接続して低周波治療が可能



安全に関するご注意

- ご使用前に、「添付文書」「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 定期的に機器の点検を行ってください。
- この機器には電気工事等が必要な場合があります。お買い求め販売店または当社営業所へご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因となることがあります。

※製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

Tokyo ken 東京医研株式会社
URL <https://www.tokyoiken.co.jp>

本社/総務部・技術部	〒206-0802	東京都稲城市東長沼1131-1	TEL 042-378-6630
大 阪 工 場	〒570-0045	大阪府守口市南寺方中通 3-12-9	TEL 06-6995-6312
営 業 部	〒113-0034	東京都文京区湯島 2-27-2	TEL 03-5807-3011
札 幌 支 店	〒063-0032	北海道札幌市西区西野2条 2-5-18	TEL 011-668-1113
仙 台 支 店	〒981-3133	宮城県仙台市泉区泉中央1-28-22-B1F	TEL 022-773-3060
埼 玉 支 店	〒336-0025	埼玉県さいたま市南区文蔵 4-12-1	TEL 048-836-4100
東 京 支 店	〒113-0034	東京都文京区湯島 2-27-2	TEL 03-5807-3013
西 東 京 支 店	〒183-0005	東京都府中市若松町 4-3-6	TEL 042-352-3055
横 浜 支 店	〒221-0865	神奈川県横浜市神奈川区片倉 4-3-17	TEL 045-413-5103
名 古 屋 支 店	〒465-0014	愛知県名古屋市名東区上菅 2-1108-3F	TEL 052-726-8971
大 阪 支 店	〒570-0045	大阪府守口市南寺方中通 3-12-9	TEL 06-6995-6301
広 島 支 店	〒731-0124	広島県広島市安佐南区大町東2-14-30	TEL 082-831-3616
四 国 支 店	〒761-1703	香川県高松市香川町浅野 332	TEL 087-815-5155
福 岡 支 店	〒812-0044	福岡県福岡市博多区千代 4-29-27-6F	TEL 092-642-7288

お問い合わせ先



タッチパネル操作



プローブ自動認識



接続コネクター



治療周波数3種類



治療中設定変更



プローブ3種類




簡単操作、扱いやすいタッチスクリーン

ソラリスD125Bは、シンプルで使いやすいタッチスクリーンをタッチするだけで治療モードの選択と設定が可能。簡単な操作で治療ができます。



電気治療器接続コネクタを標準装備

微弱電気治療器アクロトン・レボ (Achrotone Revo) と接続ができ、ダイナトロン125ソラリスと連動しサウンドヘッドから超音波と微弱電流のコンビネーション治療ができます。

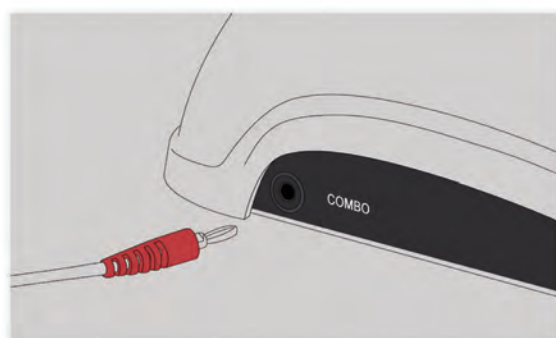

3種類のサウンドヘッド

治療部位に合わせ3種類(2cm、5cm、10cm)のサウンドヘッド(超音波プローブ)が使用できます。
標準で2cm、5cmのサウンドヘッドが本体に添付されています。※10cmはオプション



サウンドヘッド自動認識機能

3種類のサウンドヘッドを本体が自動認識し、設定変更不要で使用可能状態になります。



3種類の周波数で超音波治療が可能

2 cm、5 cm、10 cmのサウンドヘッドはそれぞれ 1MHz、2MHz、3MHz で動作し、治療部位に柔軟な超音波治療が可能です。



10cmサウンドヘッド

5cmサウンドヘッド

2cmサウンドヘッド



治療中の設定変更が可能

治療中に治療を中断することなく、治療時間、出力、周波数、デューティサイクルを設定変更できます。

デューティサイクルは 10%、20%、50%、100%(連続) が選択できます。

本体の電源が ON で待機状態の時、サウンドヘッドを温める自動ウォーミングアップ機能が選択できます。