

スーパーライザーmini付属品



スーパーライザーmini
本体



プローブ



ACアダプター



取扱説明書



治療ハンドブック

オプション品



キャリングバッグ
本体、付属品を収納する汎用バッグです。



プローブ
プローブに組み込まれている光源ランプは、約2,000 時間(定格値)の連続点灯により光を照射しなくなります。プローブをご購入いただき、本体に接続されているプローブと交換することにより、再度使用することができます。

消耗品

価 格 表

製 品 名	販売価格(税込)
スーパーライザーmini 操作パネル色：オレンジ	¥660,000-
スーパーライザーmini 操作パネル色：ブルー	¥660,000-
キャリングバッグ	¥ 11,000-
プローブ(交換用)	¥ 55,000-

仕 様

類別：機械器具 78 家庭用電気治療器
 一般的名称：家庭用赤外線治療器
 医療機器分類：管理医療機器
 使用目的/効能効果：赤外線加熱による温熱効果を目的とし一般家庭で使用する
 電気定格：AC 100V 0.34A 50/60Hz
 本体定格：DC 12V 0.9A 11W
 定格時間：10 分

ランプ：ハロゲンランプ
 分光放射率：5,000～13,000nm の波長域において 60%以上
 使用温度湿度：+10～+34℃、30～85%RH
 保管温度湿度：-20～+60℃、10～95%RH
 外形寸法：幅約 290mm 高さ約 110mm 奥行約 255mm
 重量：約 2.2kg
 付属品：取扱説明書



安全に関するご注意

●ご使用前に、「添付文書」「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

Tokyo ken 東京医研株式会社
 URL <https://www.tokyoiken.co.jp>



本 社 〒206-0802 東京都稲城市東長沼1131-1
 TEL 042-378-6630

■営 業 部 TEL 042-318-8324 ■名古屋支店 TEL 052-726-8971
 ■仙 台 支 店 TEL 022-773-3060 ■大 阪 支 店 TEL 06-7223-8971
 ■埼 玉 支 店 TEL 048-615-0800 ■中四国支店 TEL 082-831-3616
 ■東 京 支 店 TEL 042-318-8334 ■福 岡 支 店 TEL 092-642-7288

お問い合わせ先



—SUPER LIZER— mini

家庭用小型光線治療器 スーパーライザーmini



家庭での「痛み治療」が、スーパーライザーminiで容易に行えるようになりました。

スーパーライザーminiとは？

スーパーライザーminiは、医療用光線治療器スーパーライザーの機能をそのままに家庭用として小型化した光線治療器です。


光の中で最も生体深達性の高い波長帯(600nm～1,600nm)の光を、1,800mWの高出力でスポット状に照射し治療をおこないます。

スーパーライザーminiの光は、心地よい温感とともに深部に到達し、温熱効果による痛みの軽減が期待できます。

現在、医療用スーパーライザーは、操作性・治療効果・安全性が国内外で認められ、ペインクリニック(痛みの専門科目)をはじめ、様々な診療科目で治療に使われています。

「家庭で痛みの治療を容易におこないたい」とのニーズを基に、医療用スーパーライザーの機能を小型簡便化した「家庭用光線治療器スーパーライザーmini」が誕生しました。

生体深達性の高い波長帯とは？

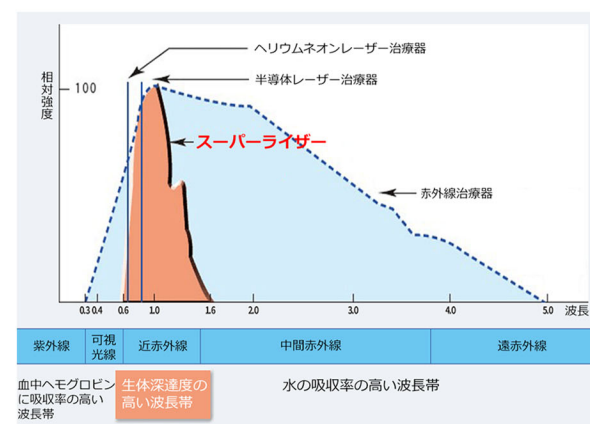

光は波長により様々な特性があります。

人の目に見える光(波長)は、可視光と呼ばれますが、人の目に見えない赤外線や紫外線などは、様々な光線治療器に使われています。


光は赤色から遠いほど温熱効果が大きくなりますが、体の水分に吸収されやすい性質があり体の深部まで光が届きません。

また、青色に近いほど殺菌作用が大きくなりますが、血液中のヘモグロビンに吸収されやすい特性があります。

スーパーライザーは、光の中で生体深達性の高い「近赤外線(600nm～1,600nm)の光」を特殊フィルターで取り出しています。

スーパーライザーの「あたたかい赤い光(近赤外線)」は、障害のある患部の血流を改善し症状を緩和してくれます。

スーパーライザーは様々な診療科目で治療に使われています。

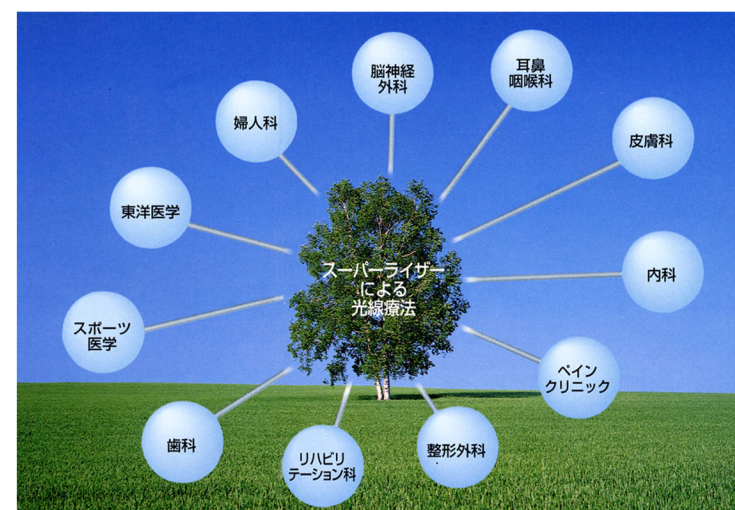


業務用スーパーライザーは、国内で25,000台、海外で5,000台を超える納入実績があり、国内外の医療施設の様々な診療科目で、治療に使われています。



簡単な操作で治癒がおこなえます。

治療する光の強さ(出力)を選び、「START/STOP」ボタンを押すと治療が開始されます。

- 出力は「弱・中・強」の3段階から選べます。
- 安全にお使いいただくため1回の治療は、10分で自動停止します。 ※出力「強」は5分で停止します。
- 治療したい場所に、プローブをあて「START/STOP」ボタンを押すと治療を開始します。
- 途中で治療を中止する場合は、もう一度「START/STOP」ボタンを押すと停止します。

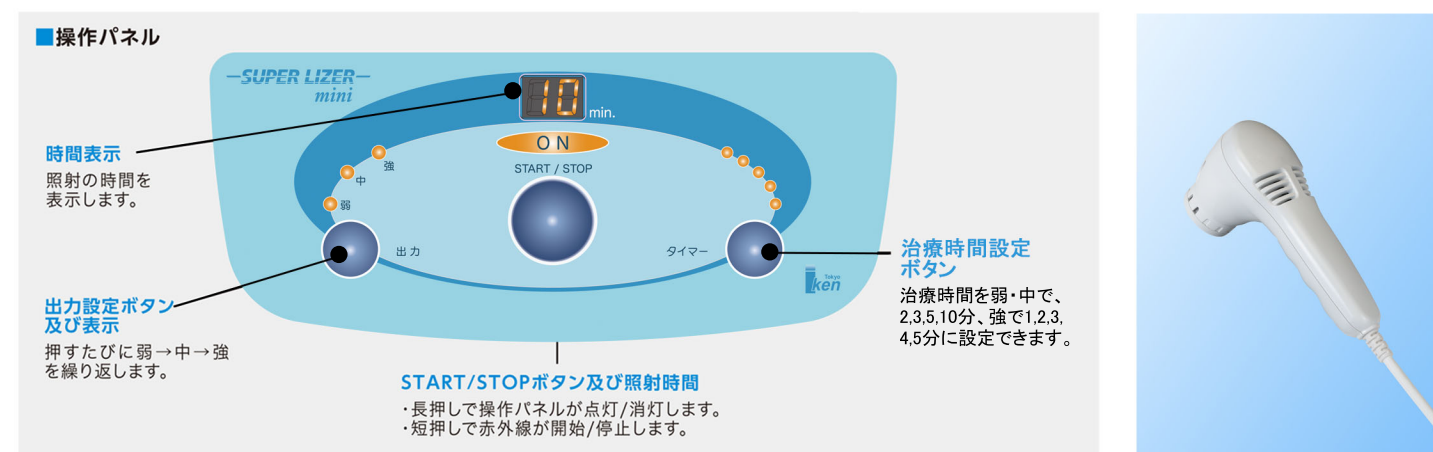


光源内蔵の小型軽量プローブ(300グラム)は、様々な患部にストレスなく治療(照射)できます。



首への照射例

首の左右には「星状神経節」と呼ばれる自律神経(交感神経と副交感神経：自分でコントロールできない神経)の中継点があります。スーパーライザーminiの首(星状神経節の近く)への照射により、自律神経のバランスを整え、人が本来持っている体全体の自然治癒能力を手助けし、局所の痛みを改善したり血流改善による様々な症状改善が期待できます。

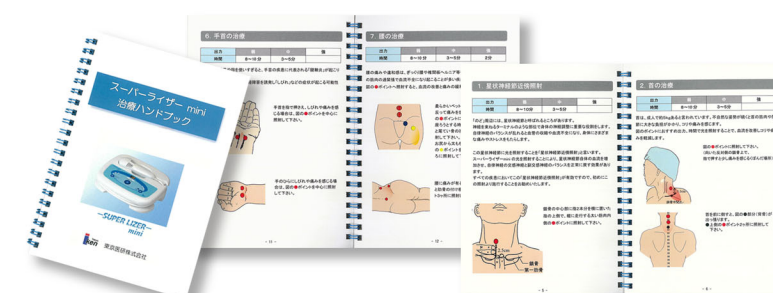

スーパーライザーminiには、「治療ハンドブック」を付属しています。



肩周辺への照射例



手首への照射例



膝への照射例