

待望の登場！



動物用小型 スーパーライザー

—SUPER LIZER— *mini*

極限の
コンパクト
設計

高出力・
高性能は
そのままに

全ての
操作が
ラクチン設計

飼い主さんへの
レンタルサービスが
できる





飼い主さん、患者さんは満足しています。

なぜなら

「スーパーライザー」は、注射針など痛みを伴う治療法ではなく、心地よい温熱感があり高い治療効果が期待できる先進の光線治療器だからです。



光線照射療法で、幅広い動物の疾患に使用されています。

適応と思われる疾患

整形外科的疾患

リウマチ、関節痛、腰痛、骨折（メタルプレート使用中も可）後の疼痛、椎間板ヘルニア等

皮膚疾患

皮膚潰瘍、口内炎、外傷、外耳炎等


その他

排尿障害、食欲不振、鍼の代用（“ツボ”を用いた全身的なさまざまな疾患に対するアプローチ）等

● 操作パネル

時間表示
照射時間を表示します。

出力設定ボタン及び表示
ワンタッチで弱→中→強を繰り返します。

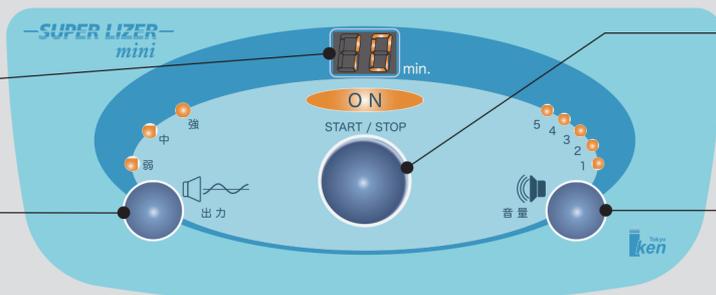

START/STOPボタン及び照射時間

- 長押しで操作パネルが点灯/消灯します。
- 短押しで赤外線が開始/停止します。

音量設定ボタン及び表示

ワンタッチで1→2→3→4→5→消灯を繰り返します。

● 標準ユニット



プローブ

光源内蔵型の小型・軽量プローブの採用により、さまざまな部位にストレスなく照射することができます。

● オプション



キャリングバッグ

スーパーライザー-miniの専用キャリングバッグです。本体、照射用固定バンド、ACアダプターを収納できます。往診用に最適です。

〈仕様〉

類別：機械器具12 理学療法用器具
 一般的名称：赤外線治療器
 医療機器分類：一般医療機器
 使用目的：小動物（犬・猫・鳥）又は大動物（馬・牛）の患部を赤外線加熱し温熱効果をもたらす
 電気定格：AC 100V 0.34A 50/60Hz
 本体定格：DC 12V 0.9A 11W
 定格時間：10分
 ランプ：ハロゲンランプ
 分光放射率：5,000～13,000nmの波長域において60%以上
 使用温度湿度：+10～+34℃、30～85%RH
 保管温度湿度：-20～+60℃、10～95%RH
 外形寸法：幅約290mm 高さ約110mm 奥行約255mm
 重量：約2.2kg
 付属品：取扱説明書
 届出番号：29動薬第3585号



安全に関するご注意 ●ご使用前に、「添付文書」「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

お問い合わせ先

東京医研株式会社
 URL <https://www.tokyoiken.co.jp>



本社 〒206-0802 東京都稲城市東長沼1131-1
TEL 042-378-6630

■営業部 TEL 042-318-8324	■名古屋支店 TEL 052-726-8971
■仙台支店 TEL 022-773-3060	■大阪支店 TEL 06-7223-8971
■埼玉支店 TEL 048-615-0800	■中四国支店 TEL 082-831-3616
■東京支店 TEL 042-318-8334	■福岡支店 TEL 092-642-7288